


外部共有を使って画像を書き出す



外部共有ボタンはライブラリ、整理、デンタル、共有ライブラリ、症例の各画面に配置されています
iPad内の写真アプリなど、Takeアプリ外に画像を書き出すことができます

書き出す画像を選択して外部共有ボタンをタップすると、共有メニューが表示されます
例として、「画像を保存」を選択します（動画の場合は「ビデオを保存」）

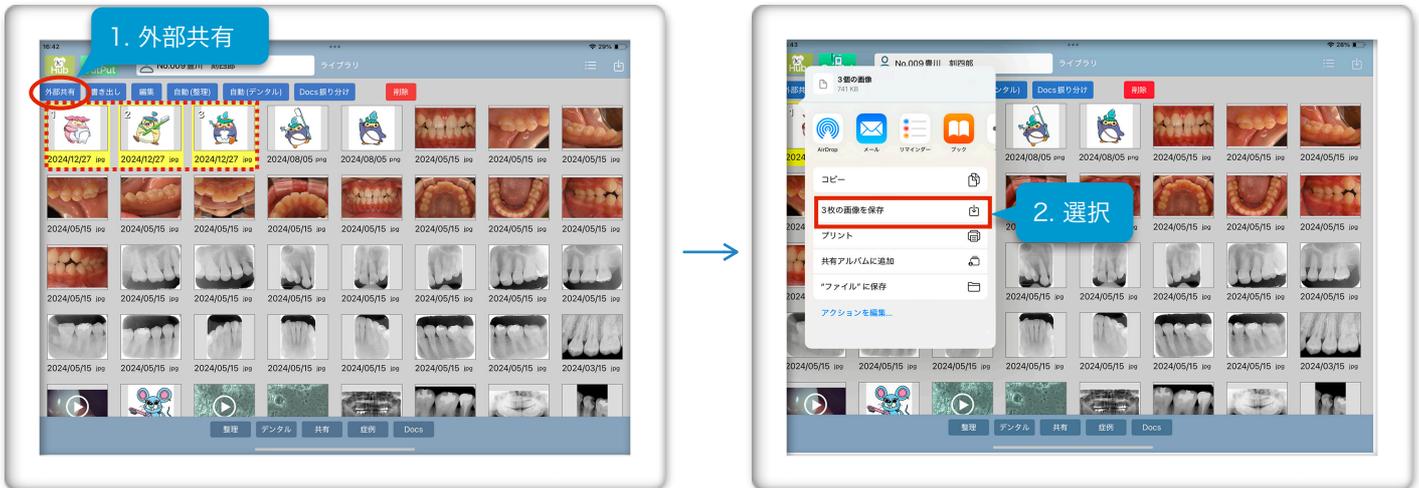

iPadのホーム画面に戻って写真アプリを起動すると、書き出した画像を確認することができます



iPadの写真アプリに書き出しができない場合の対処法

外部共有ボタンを押した時にアラートが表示された場合は、「設定画面へ」をタップし、「写真」→「フルアクセス」を選択します（設定方法はiPadOSにより異なることがあります）

