


指定のフォルダから画像を取り込む

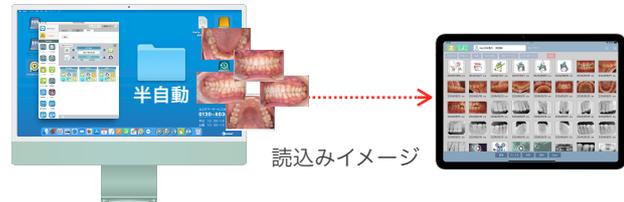

事前に連携設定が必要です（windows機との共有設定追加の場合は別途費用が発生いたします）
設定追加希望の場合はカスタマーサービスセンター（0120-803-001）までご連絡ください

Macサーバ指定のフォルダ内の画像を「ライブラリ」「症例」「共有」に読み込みます（読み込み先の指定フォルダは複数設定が可能です）



画面右上の取り込みボタンをタップして、取り込みたい画像の格納先を選択します（名称はImage Linkで設定します）

（例）ライブラリに取り込む



画像が取り込まれるので、OKをタップして完了します。

