


指定のフォルダへ画像を書き出す



事前に連携設定が必要です

設定追加希望の場合はカスタマーサービスセンター（0120-803-001）までご連絡ください



ライブラリ、整理、デンタル、共有ライブラリ、症例内の画像をmacサーバ指定のフォルダに書き出します

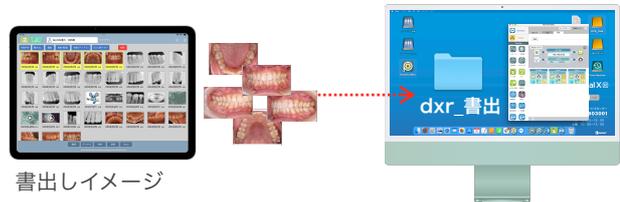

書き出す画像を選択して書き出しボタンをタップし、書き出し先を選択します



完了の表示が出たらOKをタップすると、指定したフォルダに画像が書き出されます

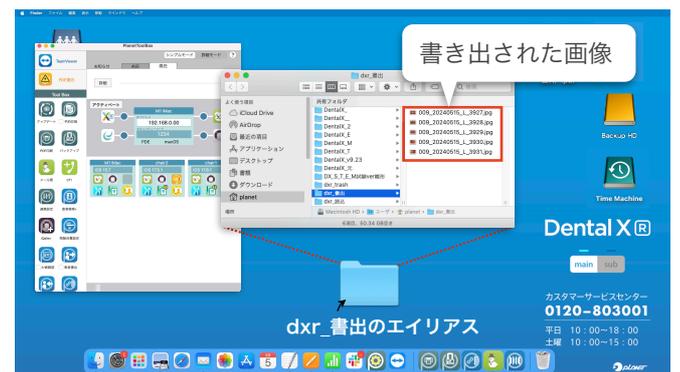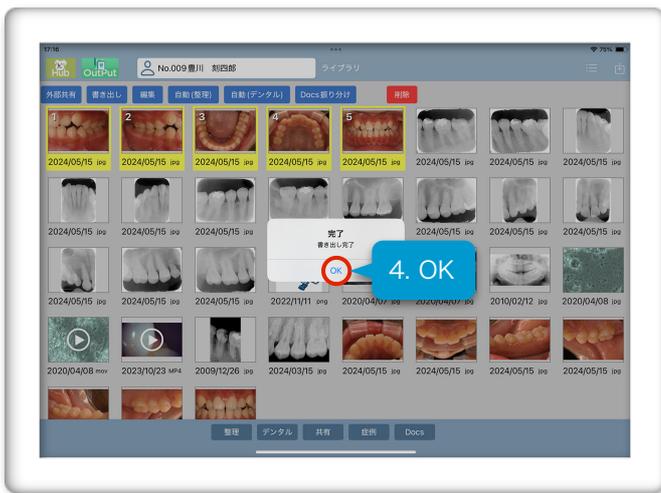

例) デスクトップのdxr_書出のエリアスに書き出された場合

書き出されたファイル名について L=ライブラリ A=整理 D=デンタル C=症例 S=共有ライブラリ

例) 009_20210321_A5_XXX.jpg カルテ番号_撮影日_書出画面記号 (+整理デンタルは画像位置番号)_ファイル番号.拡張子
↓
症例の場合先頭が「症例番号」になります/共有は先頭が「share」になります