

# DentalShotユーザー登録

DentalShotを使用するにはユーザー登録が必要です。  
ユーザー登録を行うと、登録したメールアドレスにパスワードが発行されます。  
ユーザーログインとパスワードは1医院1つです。

はじめてお使いになる方

すでに登録済みの場合は、次のページへ

## 1 新規登録をタップ



## 2 医院情報を入力後、利用規約に同意して登録をタップ



## 3 OKをタップ




## 4 登録メールアドレスにパスワードが送信される



パスワードは大切に保管してください

## すでに登録済みの方


### 1 メールアドレスとパスワードを入力してログインをタップ

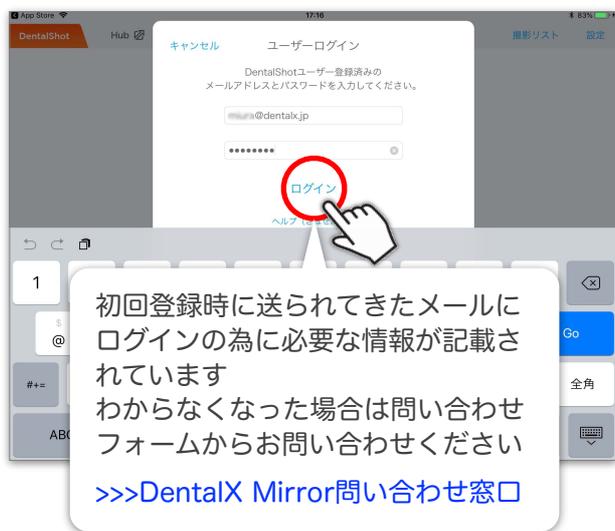

### 2 同意するをタップ



### 3 同意するをタップ

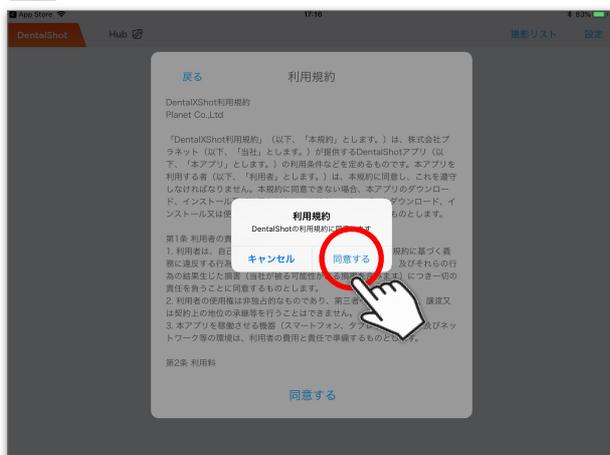

### 4 OKをタップ



次はカメラの登録に進みます >>> DentalShotのカメラ登録手順