

# DentalShotのカメラ登録手順

カメラの登録を行います。この設定を行うことにより、撮影可能になります。

DentalShotのユーザー登録が終わると、登録完了画面になります。  
画面下にカメラ登録ボタンがあるので、タップしてカメラの登録を始めます。  
説明画面に沿って進みましょう。

## カメラ登録手順



1 ~ 12 まで、順番に沿ってお進みください。

..... 次のページへ進む .....

戻る

## カメラ登録

電源を入れる

MirrorのWi-Fi接続

Wi-Fi接続の解除


名称の登録

Careの登録

確認

## DentalX Mirrorの電源を入れる

DentalX Mirrorの電源ボタンを1秒間押します  
 緑色のLEDが点滅しDentalX Mirrorが起動します。

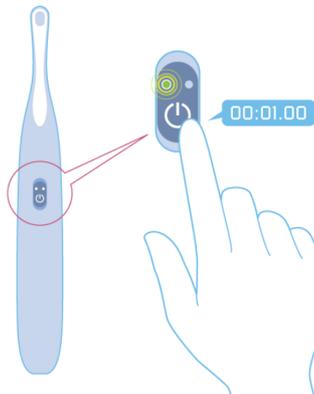

※緑色のLEDが常時点灯している場合はカメラの設定変更が必要です  
 設定の変更方法はヘルプ（さぼせん）をご覧ください

ヘルプ（さぼせんへ）

次へ

戻る

## DentalX MirrorとiPadの接続をします

電源を入れる

MirrorのWi-Fi接続

Wi-Fi接続の解除

名称の登録

Careの登録

確認

## iPadとDentalX MirrorのWi-Fi接続

接続したいDentalX Mirrorの番号を  
 iPadの「設定」>「Wi-Fi」で選択します

iPadの設定アプリからこの画面  
 に戻る時は、設定画面左上の文字  
 をタップしてください



※変更前（緑枠）のWi-Fi名をメモしておいてください

選択できたら画面左上のアプリ名（青枠の部分）を押して  
 この画面に戻ってください

1 iPadの設定アプリへ

4 次へ

◀ 戻る

## カメラ登録

MirrorのWi-Fi接続

Wi-Fi接続の解除

名称の登録

Careの登録

確認


iPadの設定アプリからこの画面に戻る時は、設定画面左上の文字をタップしてください

## DentalX Mirrorとの接続を解除

もう一度iPadの「設定」&gt;「Wi-Fi」を開いて

「」ボタンをタップして、「このネットワーク設定を削除」を選択します

4

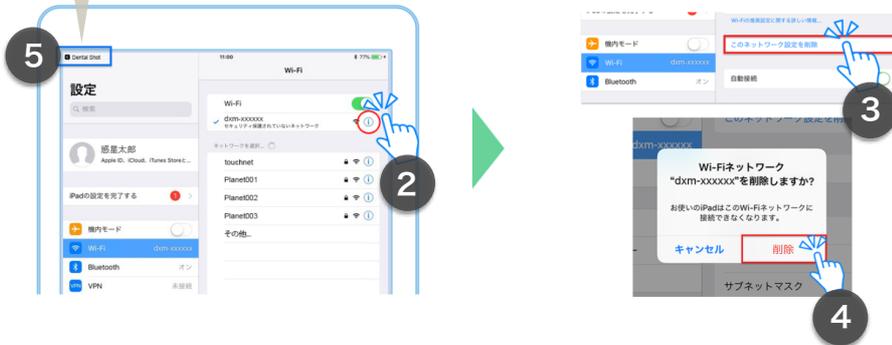

メモしておいたWi-fi名に再接続されたのを確認したら  
アプリ名（青枠の部分）を押してこの画面に戻ってください

1 iPadの設定アプリへ

6 次へ

◀ 戻る

## カメラ登録

電源を入れる

MirrorのWi-Fi接続

Wi-Fi接続の解除

名称の登録

Careの登録


確認

## DentalX Mirrorの名称を登録します

使用するときに分かりやすいようMirrorに名称をつけます

プラネット

5

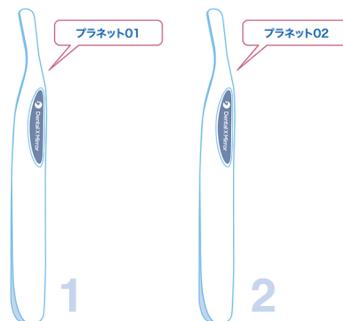

次へ

[戻る](#)

## カメラ登録

電源を入れる ▶ MirrorのWi-Fi接続 ▶ Wi-Fi接続の解除 ▶ 名称の登録 ▶ **Careの登録** ▶ 確認

## Planet Careの登録

Planet Careをご購入いただいた場合  
登録へ進んでください

[Planet Careの登録をする](#)

DentalX Mirror本体の販売終了に伴い、  
「Planet Care for DentalX Mirror  
(3年延長保証)」につきましても  
ご加入の受付を終了しております

Planet Careをお申し込みされていない方は  
プラネットWebサイトから購入いただけます

[Planet Careの購入をする](#)

ご購入されない方はこの手順をスキップし  
登録を完了してください

※後ほどご購入の場合は、カメラ登録1週間以内にお申し込みください

[ヘルプ \(さぼせん\)](#)[スキップ](#)[戻る](#)

## カメラ登録

電源を入れる ▶ MirrorのWi-Fi接続 ▶ Wi-Fi接続の解除 ▶ 名称の登録 ▶ **Careの登録** ▶ 確認

## Planet Careの設定

Planet Careをご購入いただいた場合  
Planet Care ID (10桁の番号) をご入力ください

Planet Care IDは、プラネット配信のメールにてご案内いたします

※Planet Careをお申し込みされていない方は  
プラネットWebサイトから購入いただけます  
カメラ登録後1週間以内にお申し込みください

[ヘルプ \(さぼせんへ\)](#)[次へ](#)

戻る

### カメラ登録

電源を入れる > MirrorのWi-Fi接続 > Wi-Fi接続の解除 > 名称の登録 > Careの登録 > **確認**

### 登録確認

DentalX Mirror番号

dxm-28ede056f8f3

8

名称

プラネット

PlanetCare

完了

戻る

### カメラ登録

電源を入れる > MirrorのWi-Fi接続 > Wi-Fi接続の解除 > 名称の登録 > Careの登録 > **確認**

### 登録確認

DentalX Mirror番号

dxm-28ede056f8f3

9

**登録**  
Mirrorを登録をします

キャンセル    **OK**

PlanetCare

完了

電源を入れる ▶ MirrorのWi-Fi接続 ▶ Wi-Fi接続の解除 ▶ 名称の登録 ▶ Careの登録 ▶ 確認

登録確認

DentalX Mirror番号

dxm-28ede056f8f3

登録完了  
登録ができました

OK

PlanetCare

完了

10

カメラ登録

ログイン

event@dentalex.jp

画像フィルター設定

DentalX連携設定

1902 1900 10 1100

DXR

11

戻る

### カメラリスト

iPadWiFi設定

ここに登録したカメラが表示されます

名前変更

Care登録

プラネット

dxm-28ede056f8f3

Care登録済

登録日：2018/07/04

保証期間：2021/07/04

12

planet careに加入している場合の保証期間  
：登録日から3年間

planet careに加入していない場合の保証期間  
：登録日から1年間