

DXR TaKe画面説明



ライブラリ (表示)

取り込んだ画像・動画・PDFなどを一覧表示します。


ダブルタップして画像や動画を拡大すると、トリミング・回転・反転・動画の再生ができます。

別アプリに移動

患者検索

氏名欄をタップすると検索・一覧画面が表示されます

上部検索欄からカルテ番号や名前ですべて検索ができます

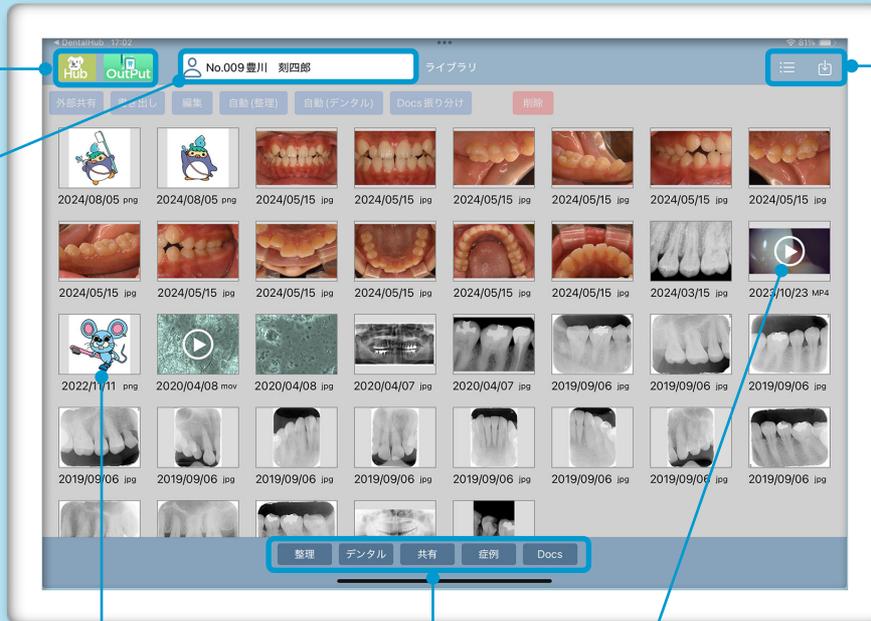

並び替え/更新

ライブラリに表示中の画像の並び替えや更新をします




画像取り込み

メニューから取り込み方法を選択します




画像拡大

画像をダブルタップして拡大すると「トリミング」や「回転・反転」が使えます

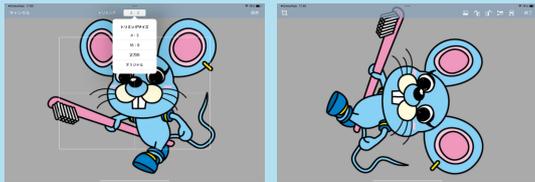

動画再生

動画をダブルタップで拡大して再生します

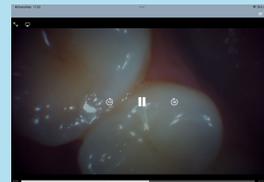


画面移動ボタン

各画面に移動します

整理

日付ごとにリスト化して保存します

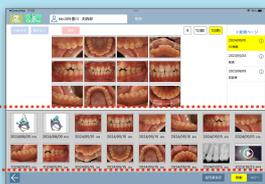

デンタル

日付ごとにリスト化して保存します



共有

共有のライブラリです



症例

症例ごとにリスト化して保存します



Docs

別途お申し込み(HP)が必要です




下段には常に「ライブラリ」画像が表示されています。移動やコピーでライブラリ画像を確認画面に配置

ライブラリ（画像選択時）

【ライブラリ】の画像を選択すると「外部共有」「書き出し」「編集」「自動（整理）」「自動（デンタル）」「Docs振り分け」「削除」ボタンが使えるようになります。

外部共有

iPadの標準機能が利用できます

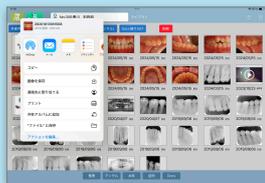

書き出し

指定フォルダに選択した画像を書き出します



編集

選択した画像情報を編集します



削除

選択したライブラリ画像を削除します

Docs

別途お申し込み(HP)が必要です

自動登録機能（自動整理／自動デンタル）

ライブラリの画像を初期設定に基づいて整理・デンタル画面に振り分けて配置します
※別途初期設定が必要です

