


次ページへ続く ↓

自動登録の初期設定方法

MacサーバのPlanetToolBoxの「DXR初期設定」ボタンをクリックして、Dental XR初期設定画面を開きます
「自動整理パターン」ボタンをクリックすると、整理・デンタルパターン登録画面になります



「新規作成」ボタンをクリックして、グループ種別を「整理／デンタル」から選択し、登録名を入力します
登録順や回転の有無をメニューから選択したら「保存」ボタンをクリックして完了です

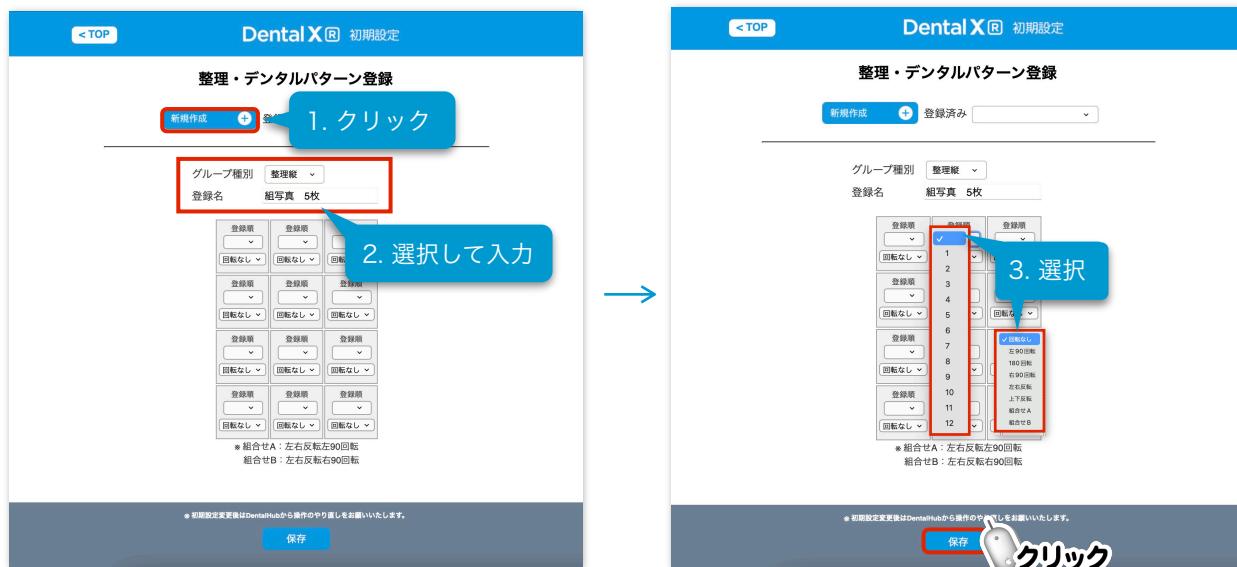

登録の確認 (DXR TaKe)

設定した登録パターンは、自動(整理)ボタンから選択できるようになります

