

SDカードやメモリなど外部から画像を取り込む




SDカードを挿入したカードリーダーをiPadに接続します

画像データの入ったSDカードと、iPadに接続するためのカードリーダーをご準備ください

① カードリーダーにSDカードを挿入します



② カードリーダーをiPadに接続します

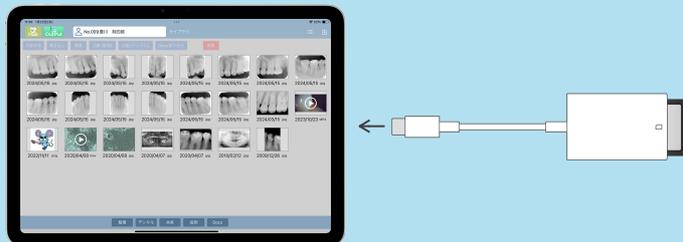



iPadの電池残量によっては、SDカードを認識しない場合があります

SDカードからの取り込みを例にしていますが、メモリスティックなど他のメディアからも取り込み可能です

画面右上の メニューから SDカード、ファイル取込をタップし、サイドバーのSDカード名を選択します



DCIMフォルダ内にある、取り込みたい画像が入っているフォルダを選択します

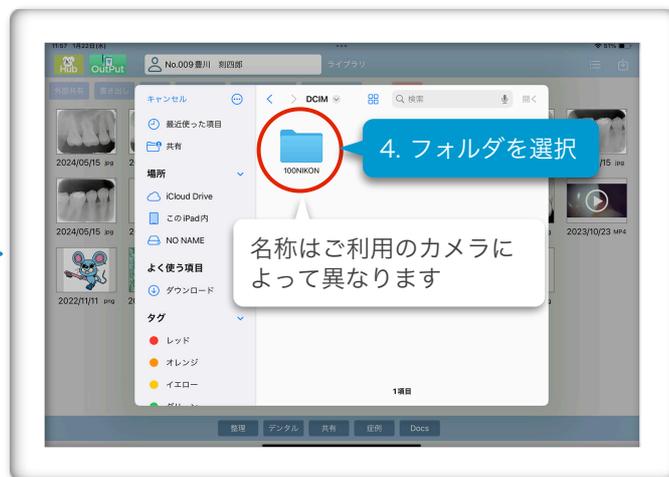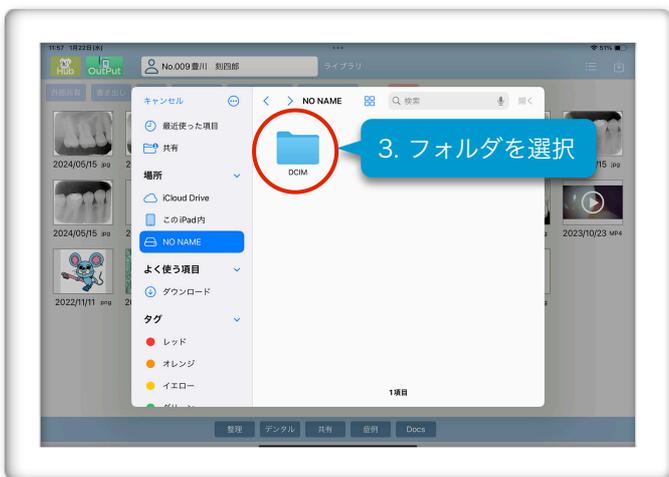

取り込みたい画像をタップしてチェックマークをつけ、右上の開くをタップします



確認後、取り込みボタンをタップすると、ライブラリに画像が取り込まれます

