



症例を作成する

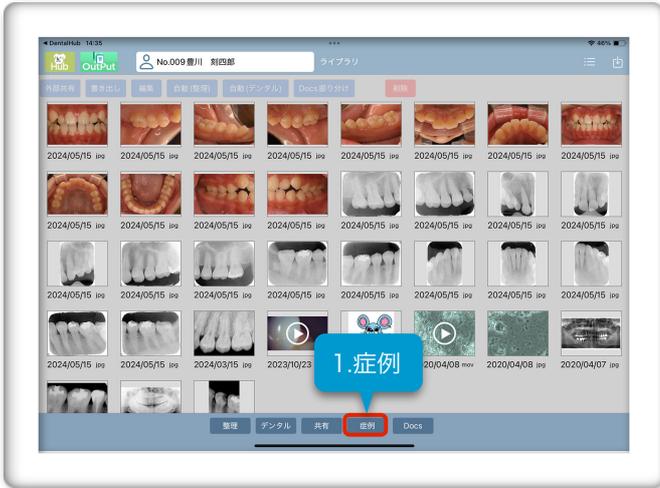

症例タブをタップして症例画面右上の+新規ページをタップします



症例番号・キーワード（タイトル）・メモを入力してキーボードを閉じ、OKをタップします

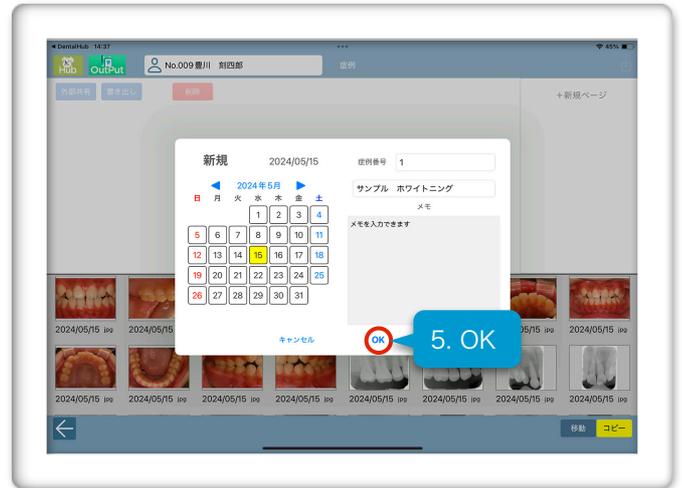

新規症例画像エリアに、ライブラリ画像から画像をドラッグ&ドロップで画像を追加します



ライブラリから画像を移動するかコピーするか選択できます


次ページへ続く ↓

画像を複数選択して、一度に追加することもできます



症例の活用 登録した症例はOutPutアプリの説明用資料に反映されます

DXR OutPut

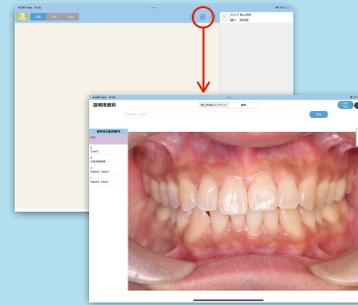


症例画像は患者さん個人の【説明】や【印刷】タブへ追加できます

コメントの編集をする

i ボタンをタップして編集画面を開き、鍵マーク🔒をタップします




編集後、キーボードを閉じてOKをタップします

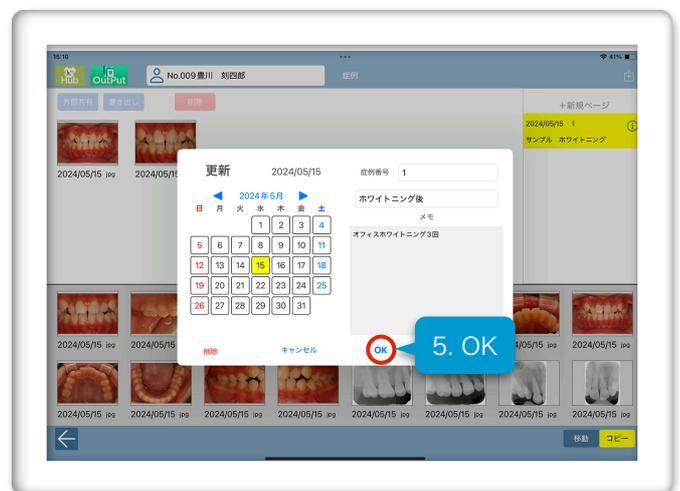

次ページへ続く ↓


症例画像を削除する

削除する画像をタップして選択（複数可）し、削除ボタンをタップするとダイアログが出るので、削除で確定します

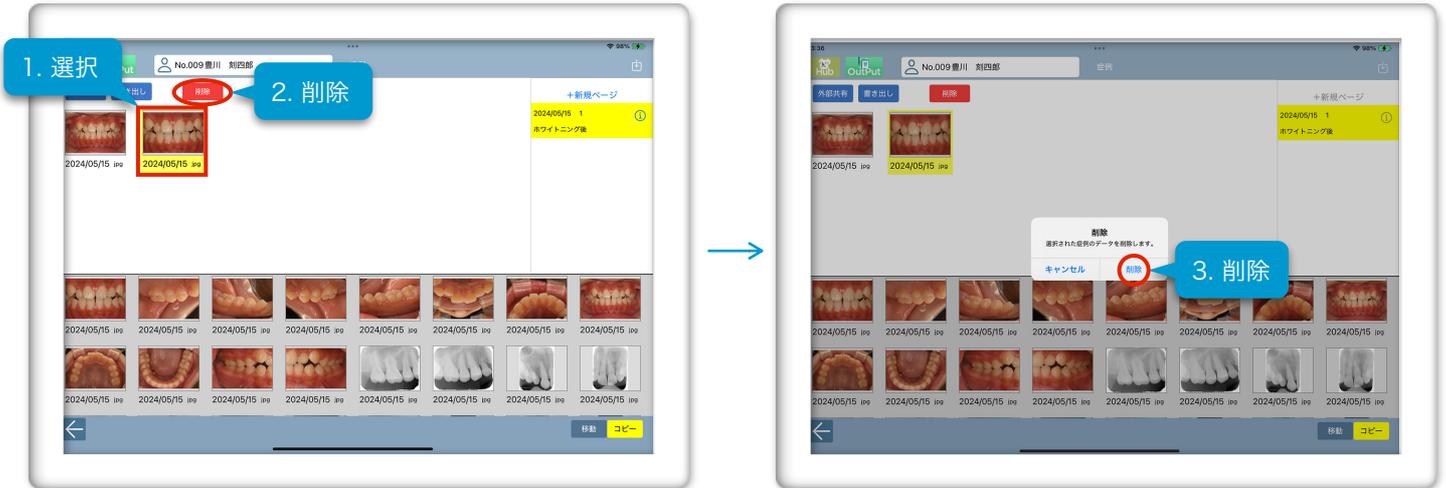

症例を削除する

削除したい症例の i ボタンをタップして編集画面を開き、鍵マーク  をタップします

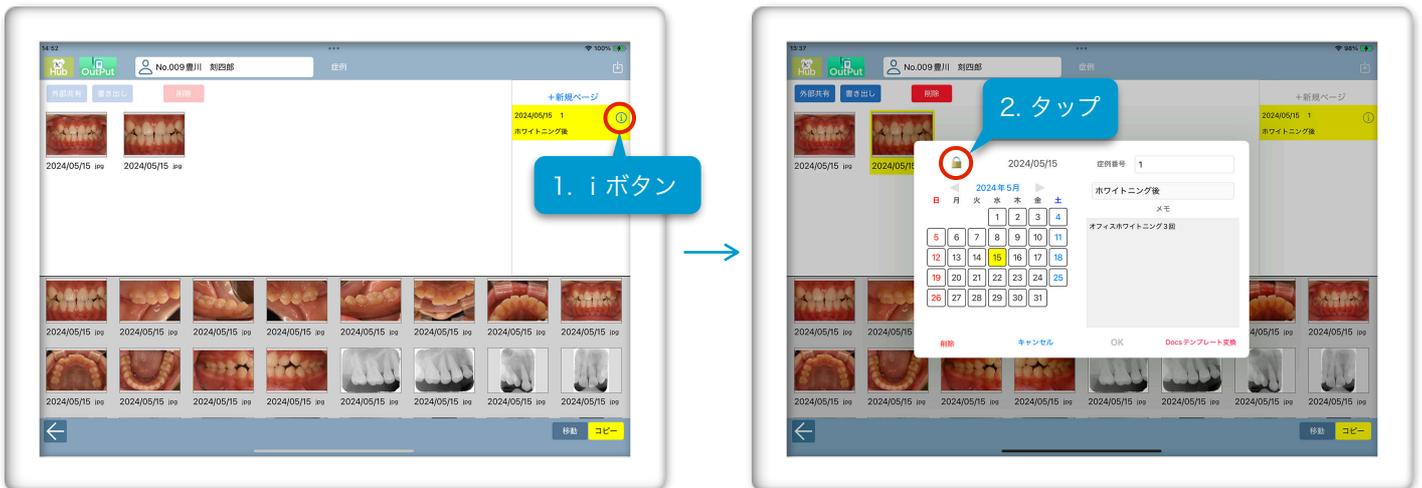

削除をタップするとダイアログが出るので、削除で確定します

